

Wirkung und Anwendung

Die Flimmerbewegungen feinsten Härchen transportieren überschüssiges Material (Ohrenschmalz, Hautschüppchen, Staubpartikel) aus dem Ohrinneren in den äusseren Gehörgang. Ab dort reicht dieser Selbstreinigungseffekt oft nicht mehr aus und das Material lagert sich ab.

flip-tips® unterstützen die natürliche Selbstreinigung des Ohrs durch Aufnehmen des angehäuften Materials im äusseren Gehörgang und lassen dabei eine notwendige Fettschicht als Säureschutzmantel gegen Krankheitserreger zurück. Mit dieser rein pflegend-präventiven Zielsetzung ist ein tieferes Eindringen ins Ohr klar der fachärztlichen Behandlung auf Sicht vorbehalten.



Anwendungsempfehlung flip-tips®:

1. Einführen des flip-tips-Stäbchens mit neutraler (senk-/waagrecht) Lamellenstellung
2. Langsames Drehen und Vorspannen des flip-tips bis die Lamelle spürbar „flippt“
3. Drehen in Gegenrichtung bis zum zweiten „Flip“, Drehrichtung ändern usw.

Dieser Vorgang ist je nach Verschmutzung mehrmals zu wiederholen, dann wieder aus dem Gehörgang ziehen und abwaschen.

- Langsames Drehen erzeugt bessere Reinigungswirkung.
- Bei trockenem Ohrenschmalz Putzlamelle befeuchten.
- Alle 2-3 Tage Reinigung wie beschrieben durchführen.

Je nach Häufigkeit der Anwendung empfiehlt sich ein Austausch des flip-tips®-Stäbchens alle 3-6 Monate, um die volle Flexibilität der Putzlamelle zu gewährleisten.